


# Bestrahlungsanweisung für den REPULS Tiefenstrahler

Halswirbelsäule



Brustwirbelsäule

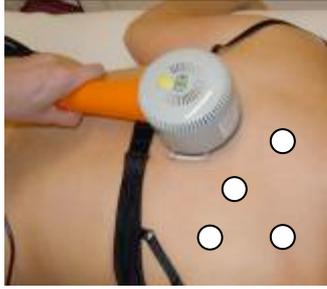

Lendenwirbelsäule



5 Minuten  
pro Punkt

Schultergelenk



Zone 1



Zone 2



Zone 3

10 Minuten  
pro Punkt

Schultermuskulatur



5 Minuten  
pro Punkt

Epicondylitis (Tennisarm)



Epicondylitis (Golferellbogen)



5-10 Minuten  
pro Punkt

Handgelenk



10 Minuten  
pro Seite

Fingergelenk



10 Minuten  
pro Seite

Daumensattelgelenk



10 Minuten  
pro Seite

# Bestrahlungsanweisung für den REPULS Tiefenstrahler

## Hüftgelenk



10 Minuten pro Zone  
Auch von der Gesäßseite

## Kniegelenk



10 Minuten  
pro Zone

## Sprunggelenk



5 Minuten  
pro Punkt

## Achillodynie



10 Minuten pro Zone

## Fersensporn



5 Minuten  
pro Punkt und Seite